



Fig 1

INFOTRONIC ULTRAFLEX GONIO MANUAL UPDATE:


Neue Gonio-Fixierung, eine wahre Sensation

Dies ist die neueste Version der Gonio-Fixierung für das INFOTRONIC ULTRAFLEX GANGANALYSE SYSTEM.

Mit diese Fixierung, basierend auf Klettbandstreifen komplettiert man die Goniosensor-Montage **innerhalb von wenigen Sekunden!**

Links (Fig. 1) sieht man den Goniometer und Verstärker fixiert in den zwei Klettbandstreifen.

Goniometer und Verstärker sind zusammen fixiert, sodass die kleinen Steckverbinder sich nicht lösen können.

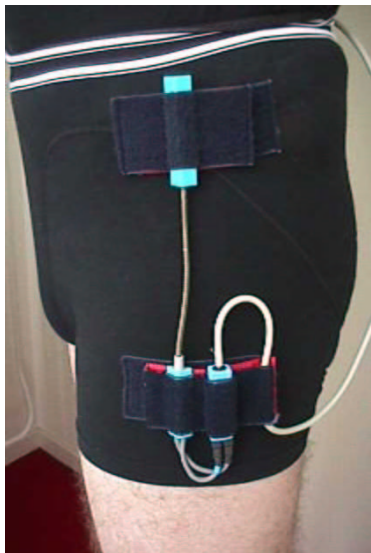

HÜFTE-KNIE- SPRUNGGELENK FIXIERUNG:

Um die Hüftwinkel messen zu können, haben wir eine spezielle, sehr flexible kurze Hose kreiert.

Diese kann **sogar über der normalen Hose** getragen werden! (obwohl es besser ist, sie direkt über den Unterkleidern zu tragen)

Auf diese kurze Hose sind Klettbandstreifen angebracht, sodass man die Sensoren einfach nur ankleben muß, und alles ist schon fertig!

Fixierung auf Knie und Sprunggelenk werden auf vergleichbare Weise gemacht. (siehe Bilder).

Diese Befestigungsmethode ist sehr schnell und einfach, und spart sehr viel Zeit verglichen mit der Konventionellen Methode mit Klebeband!

